

TWINKLES® Bonding Guide



1. Forbered tanden til bonding, som ved en almindelig plastrestauring. Rens tanden med fx pimpsten.



2. Æts overfladen i et areal lidt større end tandsmykket. Skyl og tørblæs.



3. Påfør bonding på den ætsede emalje. Fordel ved at blæse. Lyshærd i 10 sek.



4. Påfør en flow komposit på tanden.



5. Tag en Twinkles op ved at trykke Starpicker let mod forsiden af smykket. Brug ikke pincet. Placer Twinkles på flow kompositten og drej Starpickeren let for at løsne den.



6. Glat den overskydende komposit rundt om Twinkles. Lad kompositlaget være tykkest rundt om kanten af smykket, og tynd det gradvist ud, væk fra smykket. Herved skabes et mekanisk greb om Twinkles. **Ved fastgøring af krystaller er det**

afgørende også at bonde siderne af krystallen, for at forhindre at krystallen løsnes fra foliebagsiden.



7. Pres på Twinkles for at sikre kontakt med emaljeoverfladen. Lyshærd fra lingualfladen i 20 sek. (følg anvisning for kompositten). Lyshærd derefter i 20 sek. fra alle flader, slut af med labialfladen. Poler om nødvendigt kompositkanterne med en gummi point (pas på smykket).

Tips: Hvis du ikke har en Starpicker, kan et lille stykke voks anbragt på en sonde, presses mod smykkets labialflade, og derved lette håndteringen. Brug ikke pincet. Rør ikke ved smykkets underside. Hvis undersiden berøres, skal den renses med 70 % ethanol. Brug ikke syreæts på smykket.

Sådan fjernes Twinkles: Smykket fjernes på samme måde som en bracket. Fjern efterfølgende kompositrester og poler overfladen. Pas på emaljen, kun adhæsivet skal fjernes.

Twindent er ikke ansvarlig for skader opstået ved påsætning, brug og fjernelse af Twinkles.