

Mode d'emploi

Twinkles et Dental Crystal

Nota: Bijou dentaires ne peut être appliqué efficacement que sur une dent



1. Poser un rouleau de coton sec entre la dent et la lèvre supérieure. Nettoyer toute la surface de la dent en la frottant en mouvements réguliers, de haut en bas, avec un coton sec.



2. Appliquer le gel bleu de mordantage (Twinkles Blue Etching Gel) sur une surface plus grande que celle sur laquelle le bijou sera posé. Laisser le gel agir pendant 20 secondes. Éliminer le gel en passant sur la dent, de haut en bas, un rouleau de coton sec. Nettoyer soigneusement avec un coton humide pour mouiller la surface de la dent. Procéder toujours de haut en bas pour éliminer toute trace de gel et pour éviter tout contact du gel avec le palais. Avec un coton sec, sécher la dent jusqu'à obtention d'une surface blanche givrée. Cela est essentiel pour réaliser une fixation solide du bijou. Faute d'obtenir une surface givrée, répéter la phase d'application du gel.



3. Appliquer avec la brosse une fine couche d'adhésif (Twinkles Bonding) sur la surface givrée.



4. Appliquer le composite fluide (Twinkles Flowable Composite) sur une surface un peu plus grande que le bijou et avec environ la même épaisseur.



5. Saisir le bijou avec l'applicateur (Starpicker) et le placer sur le composite. Retirer l'applicateur en le faisant pivoter.



6. Placer minutieusement le cristal au centre du composite. Il est important pour le collage des Cristaux de laisser l'adhésif remonter légèrement sur les côtés du Cristal afin d'assurer une meilleure rétention.



7. Appuyer doucement sur le bijou avec la sonde. Éviter toute tache de composite sur le bijou. Photopolymériser au travers de la face palatine pendant 20 secondes, puis latéralement en face vestibulaire pendant 20 secondes pour chaque angle.

IMPORTANT :

Ne pas manipuler le bijou avec des précelles, utiliser le Starpicker ou de la cire. Blanchement dentaire peut changer la couleur du cristal.

Twindent ne peut être tenu responsable des dommages et blessures résultants du collage, de utilisation ou de la dépose des Twinkles.

© Twindent 2000 www.twindent.se

TWIDENT 