

# TWINKLES® Bonding Instruktion



1. Polera tandytan. Tandsmycket i sig behöver ej behandlas.



2. Etsa den del där tandsmycket ska sitta, lite större än själva smycket. Spola och blästra torrt.



3. Applicera bonding, blästra och härda.



4. Blästra igen och lägg på flytande komposit på en yta något större än smycket.



5. Plocka upp smycket med Starpickern. Använd inte pincett. Lägg smycket mot kompositen, vrid Starpickern ett kvarts varv och denna släpper nu smycket lätt.



6. Med sonden, jämna till kompositen runt om - tjockare mot smycket och tunnare utåt - ca 1 ½ mm. Du får på så sätt en mekanisk låsning och försäkrar dig samtidigt att det inte tränger in bakterier under smycket.

Vid fastsättning av kristaller är det mycket viktigt att kompositen binder sidan och inte bara baksidan. Risken är annars stor att glaset så småningom separerar från den underliggande folien och faller av. Lättast görs detta genom att "kana" kristallen runt i kompositen med sonden.



7. Tryck till igen på smycket så att den får kontakt mot emaljen. Ljushärda först från baksidan och sedan snett från alla riktningar 4 x 20 sek. Putsa kompositen blank. Vid behov även rosa på guld. Se till att det inte finns någon skarv.

För att fästa Twinkles på en konkav tand, böj smycket efter tandens form så fäster det bättre. Var försiktig så smycket ej bryts.

## Borttagning

Nyp bort smycket med ligaturavbitare eller polera med high speed. Ta bort överskottskompositen och polera.

Twindent tar inte ansvar för skador som kan uppkomma vid felaktig bonding, användning eller avlägsnande av Twinkles.

© Twindent 2000 [www.twindent.se](http://www.twindent.se)

**TWINDENT**  
DENTAL JEWELRY