

Applikationsempfehlung

Twinkles und Dental Crystals

Verarbeitungsanleitung zur Befestigung von Zahnschmuck am natürlichen Zahn



1. Zahnoberfläche mit einer fluoridfreien Polierpaste reinigen und trocknen.



2. Die vorgesehene Fläche – etwas größer als der Zahnschmuck – anätzen (z.B. mit M+W Ätzelgel), spülen und trocknen.



3. Lichthärtendes Bonding applizieren und aushärten (gemäß Herstelleranweisung).




4. Ausreichend fließfähiges Composite auftragen.



5. Zahnschmuck mit Hilfe eines Klebestäbchens (haftende Applikationshilfe) fest platzieren.



6. Überschüssiges Composite entfernen. Bitte beachten, dass die Dental Crystals richtig eingebettet sind (auch die Seitenflächen sollten mit Composite bedeckt sein), um so eine optimale Haftung zu erzielen.

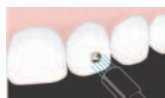

7. Vor dem Aushärten von allen Seiten (palatinal, danach von oben und rundherum) noch einmal andrücken. Übergänge sorgfältig polieren.

Wichtig:

Die Klebefläche des Zahnschmuckes sollte sauber sein und darf nicht berührt werden. Falls nötig, bitte mit 70%igem Alkohol reinigen. Keinesfalls den Zahnschmuck anätzen.

Entfernungstechnik

Gleich wie bei der Entfernung von Brackets. Danach Entfernen der Composite-Schicht und Polieren der Zahnoberfläche, ohne den Zahnschmelz zu schädigen.

Haftungserklärung

Twindent ist nicht verantwortlich für etwaige Verletzungen, die aus der Applikation, Verwendung oder Entfernung von Twinkles entstehen könnten.

Hinweis: Twinkles und Dental Crystals benötigen kein CE-Zeichen, da es sich um Zahnschmuck handelt.